

RADNA UPUTA:

Postupak za čišćenje i dezinfekcija posuda za endoskope/instrumente

Ur. broj:

	Ime i prezime	Datum	Potpis
Izradio(la):	Valentina Barić, bacc.med.techn. Sestra za kontrolu bolničkih infekcija	17.7.2019.	
Pregledao(la):	dr.med Ljiljana Hodak, spec. mikrobiolog. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu	17.07. 2019.	
Odobrio(la):	Tim za kontrolu bolničkih infekcija OŽB Našice	17.07. 2019.	

1) POSTUPAK

Postojećom otopinom dezinficijensa koja se nalazi u posudi za endoskope, četkicom mehanički očistiti vanjske rubove posude za endoskope, te poklopac.

Zatim izliti dezinficijens, te isprati posudu i poklopac pod tekućom vodom.

Ostaviti posudu i poklopac u okomitom položaju .